



Coagulometro Veterinario PoCT

- ✓ **semplicità e immediatezza d'uso**
- ✓ **risultati affidabili**
- ✓ **card a secco con sangue intero**
- ✓ **portabilità 100%** (batterie al litio ricaricabili)

Wondko

Wondfo Wholly-owned Company

distribuito in Italia da ASSEL srl



Step by Step

Step by Step

Accensione



Riscaldamento



prelevare il campione (in Sodio Cit.)



Inserire la Card

dispensare 20µL di sangue intero



Esecuzione

Elaborazione del Risultato




P.R.I.S.M.A.
www.prismaonline.it

Principio di Funzionamento

Il reagente specifico è già predosato a secco sulla card.

Dopo una rapida incubazione e l'aggiunta del campione, lo strumento procede con una miscelazione automatica fino alla formazione e rilevamento del coagulo.

Il risultato del Test eseguito apparirà sul display touch screen e potrà essere memorizzato e stampato.

Sistema di misura ottico "Golden Standard"



Conservazione dei kit a Temperatura Ambiente



Pregi

Semplicità d'uso senza manutenzione



Accuratezza e Affidabilità dei Risultati



Applicazioni

Screening dell'attività coagulativa della via intrinseca e estrinseca

Monitoraggio T.A. e veleni ad azione scoagulante

Monitoraggio di patologie quali tumori, bruciature, infezioni e epatiti

Monitoraggio della coagulazione intravascolare, trombosi e relativa terapia

Test Disponibili

| Test | Volume Campione * | Range di Riferimento | | Temper. conserv. | scad. mesi | REF 12 pz. |
|------|-------------------|----------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| | | Cane | Gatto | | | |
| PT | 20µL | 5-15s | 6-15s | 4°~30°C | 18 | V211 |
| INR | 20µL | INR:0.5-1.6 | INR:0.5-1.6 | 4°~30°C | 18 | |
| APTT | 20µL | 15-45s | 15-43s | 4°~30°C | 18 | V212 |
| FIB | 20µL | 1-3g/L | 1-2.5g/L | 4°~30°C | 18 | V213 |
| TT | 20µL | 10-100S | 10-100S | 4°~30°C | 18 | |
| ACT | 20µL | 50-150s | 50-140s | 4°~30°C | 18 | |